


OH2Plus

OH2PLUS.COM.BR

OH2PLUS HYDROGEN FULL

oh2plus.com.br

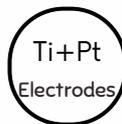

MANUAL DO USUÁRIO

SUMÁRIO

- 01** APRESENTAÇÃO
- 02** PRIMEIRO USO
- 03** USO DIÁRIO
- 04** USO COM ADAPTADOR PET
- 05** USO DO INALADOR DE
HIDROGÊNIO
- 06** RECOMENDAÇÕES DE USO



APRESENTAÇÃO

O PACOTE INCLUI:



Tubo/Interface para inalação

+



Adaptador de garrafas PET



Carregador USB tipo C

PARTES DA GARRAFA:

Valvula de
pressão

Alça de
silicone

Acrilico
Eco Tritan


Anel luminoso

Base de silicone
antiaderente

Botão de inox



PRIMEIRO USO

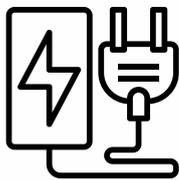

Aviso importante: para o maior aproveitamento de sua bateria, antes do primeiro uso, é necessário o carregamento de no mínimo 06 horas ou até que a luz verde acenda (indica que a bateria está carregada).

ATENÇÃO: utilize carregadores de celular de saída única de 5V (2A ou 3A). Esta informação está descrita no carregador USB. Portas USB de notebook ou PC também são permitidas

Antes de iniciar o uso de sua **OH2PLUS HYDROGEN FULL**, faça uma lavagem prévia com água e sabão neutro somente da **tampa e do corpo da garrafa**.

Agora, siga atentamente as instruções abaixo para ativar a membrana de prótons PEM.

Esse procedimento precisa ser realizado somente uma vez:

1. Desenrosque a base da garrafa e remova o **lacre protetor dos eletrodos (desenrosque no sentido anti-horário e remova a peça)**. Enrosque novamente a base no vidro. Guarde o lacre na caixa original;

Remova o Lacre Protetor dos Eletrodos



2. Deixe a garrafa carregando: Conecte o cabo USB na base da garrafa e a outra extremidade em qualquer carregador de celular. Ligue o carregador na tomada.

2.1 Verifique se o botão "power" está com a luz vermelha, indicando que a bateria está carregando.

2.2. Aguarde algumas horas até que a luz do botão fique verde, indicando que a bateria está completamente carregada

3. Agora você deve seguir o procedimento para **ativar a membrana PEM** (que fica entre os eletrodos).

3.1. Para ativar a membrana. Encha 80% da capacidade da garrafa com água potável. E feche a tampa.

3.2. Clique duas vezes no botão "power", isso irá ativar a geração de hidrogênio por **10 minutos**.

3.3. Deixar a água hidrogenada na garrafa fechada por **08 horas**. Isso irá ativar a membrana de prótons PEM. Esse procedimento é feito somente uma vez.

USO DIÁRIO

O consumo de água hidrogenada não tem contra indicações. Portanto, você pode hidrogenar sua água sempre que sentir sede, substituindo por completo a água comum. Dessa forma, você vai obter a maior eficácia dessa terapia.

Após colocar a água a ser ingerida dentro da sua **OH2PLUS HYDROGEN FULL**, acione o botão de acordo com sua preferência:

- Pressione o botão uma vez (clique simples): **modo de 5 minutos de hidrogenação**;
- Pressione o botão 2 vezes (duplo clique): **modo de 10 minutos de hidrogenação**;

Quando o gerador da água do hidrogênio está funcionando, pressione o botão uma vez para desligar o gerador, a luz apagará.

Níveis de hidrogenação:

- 🕒 5 minutos (um clique): **concentração de hidrogênio** : 1500ppb;
- 🕒 10 minutos (dois cliques): **concentração de hidrogênio**: 3000ppb;
- 🕒 10 minutos por 2 vezes: **concentração de hidrogênio**: 5000ppb~5500ppb.

* A luz azul acenderá indicando que o gerador de hidrogênio está em funcionamento.

Caso seja acionado a hidrogenação na mesma água por mais de 10 minutos, você deve liberar a pressão da garrafa, apertando na parte superior da tampa a cada 10 minutos passados.

USO COM ADAPTADOR PET

Para sua maior praticidade, você pode anexar garrafas de água mineral de 350ml na base geradora de hidrogênio usando o pequeno adaptador de transferência que vem juntamente com sua garrafa. Para isso basta desenroscar o corpo de vidro da garrafa e, em seguida, enroscar o adaptador e a garrafa PET de 350ml. (figura 03)



Figura 03


USO DO INALADOR DE HIDROGÊNIO

Para realizar a inalação do Hidrogênio, siga o procedimento:


1. Coloque água na garrafa




2. Abra o plug de silicone localizado na parte interna da tampa.

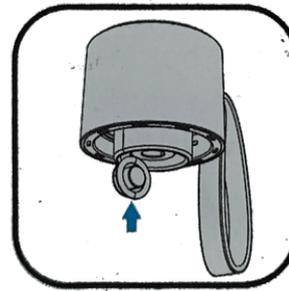

3. Feche a garrafa novamente.
Conecte a canula NASAL

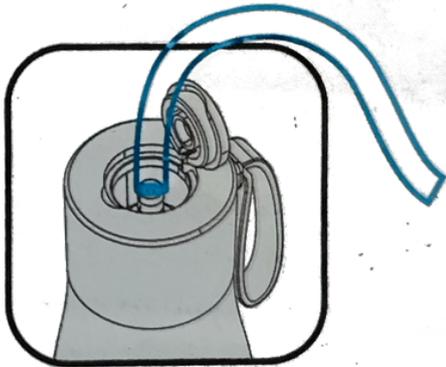

4. Instale a canula nasal em suas narinas.
Ligue o gerador com duplo-clique.

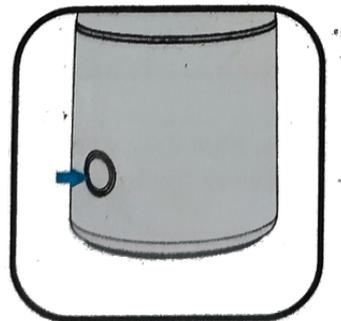

LIMPEZA E CUIDADOS

Para fazer uma limpeza eficaz em sua garrafa, você precisa separar as partes laváveis. Siga os passos:

1. Desenrosque a base geradora do copo de acrílico e tampa
2. Lave com detergente neutro somente as partes laváveis: tampa e copo do vidro.
3. Coloque 30ml de vinagre de álcool (branco) nos eletrodos, deixe agir por 20 minutos (não precisa ligar o gerador)
4. Enxague os eletrodos como remover o vinagre com cuidado para não molhar a parte externa da base.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- ⚠ Este aparelho deve ser utilizado apenas para os fins descritos neste manual. O fornecedor não pode ser responsabilizado por danos causados por utilização incorreta.
- ⚠ Deixe sempre um pouco de água na garrafa, de modo que os eletrodos NUNCA fiquem secos.
- ⚠ Não acionar a hidrogenação por mais de 30 minutos seguidamente sem abrir a tampa (risco de alta pressão).
- ⚠ Use somente água potável para hidrogenar com temperatura máxima de 50 graus.
- ⚠ Não molhe/mergulhe a parte externa da Base.
- ⚠ Evite a exposição prolongada ao sol
- ⚠ Nunca abra a base do aparelho.
- ⚠ Para recarregar a bateria, utilize portas USB do notebook ou carregadores de celular de saída única de voltagem até 5V, de 2A ou 3A. Essa informação está descrita no carregador.